

Dispositif de nettoyage d'électrode Blayco

> Description du produit

Au cours de la procédure électro chirurgicale, des débris de tissus carbonisés peuvent s'adhérer à la pointe de l'électrode, augmentant la résistance au flux de courant et réduisant ainsi les performances de l'électrode. Les grattoirs des électrodes sont utilisés pour éliminer ces impuretés de la surface des électrodes dans les manches de bistouri jetables ou réutilisables.



> Caractéristiques du produit

- Produit à usage unique. Ne précise pas de maintenance.
- Produit radio opaque.

> Spécifications techniques

> Matériaux

- Coussinet : Mousse.
- Surface grattoir : Plastique estampé.
- Adhésive : Sans latex.
- Protecteur : Papier siliconé.
- Control radio opaque : Filament BaSO4
- Poche :
 - Papier de cellulose, grade médical.
 - Film PET/PE.

> Principales propriétés dimensionnelles

- Surface : 50 x 50 mm
- Grosseur : 6,0 mm

> Stérilisation et date de péremption

- Produit stérile par oxyde d'éthylène.
- Péremption : 3 ans après la date de fabrication

> Conservation et maintenance

- Conserver à l'abri du rayonnement solaire et des intempéries.
- Conserver dans un endroit sec.
- Limitation de température : 5°C – 40°C.
- Humidité relative : 20% - 80%,

> Conditionnement

#	Conditionnement
TCG01	Poche individuelle stérile. 250 poches par carton d'emballage.

> Mode d'emploi

- Ouvrir l'emballage juste avant utilisation.
- Retirer le film protecteur de l'arrière adhésif du tampon et appuyer le nettoyeur de pointe sur les champs opératoires de manière à ce qu'il soit bien placé pour faciliter le nettoyage de la pointe du bistouri électrique.
- NB : Pour éviter la chute du matériel dans le champ opératoire, ne pas procéder au nettoyage de la pointe aux environs de la zone d'intervention.
- Le repère radio-opaque à l'intérieur du produit permet de le localiser par radiographie en cas de perte accidentelle dans le champ opératoire.
- Si une réduction du potentiel abrasif et de nettoyage du tampon est observée pendant l'utilisation, il est recommandé de remplacer le produit.
- Le produit doit être éliminé après toute intervention chirurgicale.

Date: Janvier 2024

N. Spécification: ETP/024/13

> Information réglementaire

TELIC S.A.U. garanti que ce produit répond aux exigences requises de la **Réglementation (UE) 2017/745** et qu'il est fabriqué, selon la normative du Système de Qualité certifié comme **ISO 13485**.

Ce produit se classe comme :

- Produit de **classe I stérile** selon l'Annexe VIII du Règlement (UE) 2017/745, règle 1.
- Code GMDN: 37483 Compresse de nettoyage pour pointes électrochirurgicales
- Code GMDN : V9099 Divers DM non classifiés