



Fiche Technique

TONDEUSE CHIRURGICALE PROFESSIONNELLE A TÊTE FIXE Référence 9681



Corps de la tondeuse et chargeur

- Dispositif médical de Classe I, non stérile, sans fonction de mesurage
 - Charge initiale 3 heures
 - Charges suivantes 3 heures
 - Autonomie de tonte jusqu'à 160 min
 - Batterie Lithium-Ion (Li-on)
 - Durée de vie 3 ans (500 cycles)
 - Régime de coupe 5500 - 6000 oscillations / minute
 - Niveau sonore 71,4 dB

 - Poids de la tondeuse (avec lame) 180 g
 - Dimensions de la tondeuse (avec lame) 15,5 cm de longueur / 4,3 cm de circonférence
 - Largeur de coupe 3,6 cm

 - Garantie 2 ans à partir de la date de fabrication
 - Origine matières premières USA
 - Fabriqué par 3M Health Care, St Paul, USA
 - Distribué par 3M Health Care, Neuss, Allemagne
 - Marquage CE oui
 - Conforme aux exigences essentielles de la Directive Européenne 93/42CEE
- ATTENTION : le numéro se trouvant au pied de la tondeuse ou sur les lames ne correspond pas à la date de péremption mais au numéro de lot de fabrication



Fiche Technique

Mode d'emploi

- Bien sécher la peau
- Décoller les poils de la peau
- Tendre la peau pour les endroits difficiles d'accès (appareil génital)
- Tondre dans le sens contraire de la pousse du poil et en effectuant de légers mouvements brefs
- Ne pas relever la lame pendant la manœuvre → Tire sur le poil
- Maintenir une légère inclinaison (15-30 degrés) entre la lame et la peau durant la tonte

Indicateur de charge

- Les cinq voyants indiquent le niveau de charge de la batterie.
- Lorsque le niveau de la batterie est bas, le voyant clignote, indiquant que la tondeuse doit être rechargée.
- Les voyants clignotent lorsque la tondeuse est en cours de chargement.

Entretien, stockage et élimination

- Tondeuse rinçable ou immergeable.
- Tondeuse et chargeur : nettoyer avec une solution désinfectante.
- S'assurer que la tondeuse est bien sèche avant de la replacer sur son socle-chargeur.
- Ne jamais stériliser le corps de la tondeuse quelle que soit la méthode.
- Conserver la tondeuse et son chargeur dans un local dépourvu d'humidité.
- Pour les appareils en fin de vie, utiliser le circuit de collecte et de traitement des DEEE existant dans l'établissement ou contacter le prestataire de 3M au 0825 825 732.

Caractéristiques électriques

- Tension du moteur DC de 3,6 volts
Intensité sans charge : 1 A max
Intensité à charge maximale : 1,3 A max
- Circuit de charge Alimentation 100-240V CA 50-60Hz



Elément appliqué de type BF



Appareil de classe II - Double isolation

Conforme à la norme internationale IEC 60601-1 (2005) concernant les appareils électromédicaux.

Conditionnement

- Tondeuse chirurgicale à tête fixe **Réf - 9681** (1 par boîte)
 - Socle chargeur pour tondeuse chirurgicale 9681 **Réf - 9683** (1 par boîte)
 - Lames à usage unique pour tondeuse à tête fixe **Réf - 9680** (50 par boîte)
- La tondeuse chirurgicale à tête fixe réf.9681 ne peut être utilisée qu'avec le socle-chargeur réf.9683 et les lames à usage unique réf. 9680.

3M France

Marchés de la Santé

Boulevard de l'Oise

95006 Cergy Pontoise Cedex

Tél.: 01 30 31 82 82

Fax : 01 30 31 85 65

13/12/12