




Medline International France SAS
Le Val Saint Quentin - 2 rue René Caudron
78960 Voisins le Bretonneux
Tel : 01 30 05 34 00
Fax : 01 30 05 34 52
www.medline.com/fr

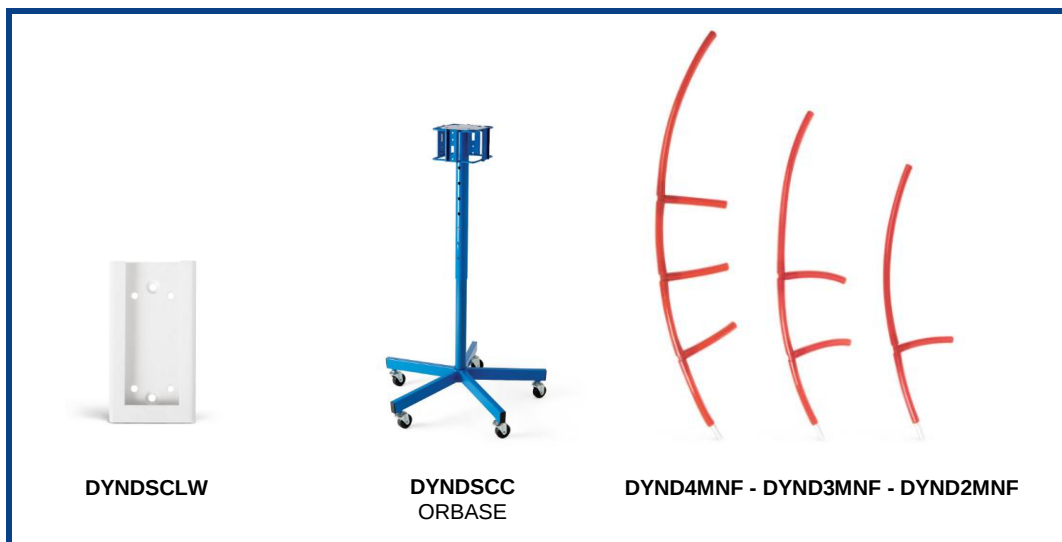

DYNDSCCLW

DYNDSCC
ORBASE

DYND4MNF - DYND3MNF - DYND2MNF

Fiche technique

Equipement réutilisable pour les systèmes d'aspiration Medline MED-SOFT, MED-RIGID, MED-SEMIRIGID

Référence(s)

DYNDSCCLW : Support mural
ORBASE, DYNDSCC : Support mobile au sol
DYND2MNF, DYND3MNF, DYND4MNF : Manifold, tube de vide renforcé

Description

DYNDSCCLW : Support plastique pour un bocal à fixer sur le mur à l'aide de vis (non inclus). Une fois le support mural fixé, un bocal (ou anneaux de support) réutilisable peut être glissé sur le support via le bras de fixation rouge pour une utilisation optimale des produits Medline MED-SOFT, MED-RIGID and MED-SEMI RIGID. Dispositif réutilisable.

DYNDSCC : Pied mobile au sol, taille standard, métal.
ORBASE : Pied mobile au sol, petite taille, plastique.

Les pieds mobiles Medline possèdent 4 supports pour glisser les bras de fixation des bocal MED-SOFT et MED-SEMI RIGID (ou les anneaux de fixation des bocal MED-RIGID). Adaptables en hauteur, ils sont mobiles et stables grâce à leurs 5 roulettes. Dispositif réutilisable.

DYND2MNF : Manifold pour la connexion de 2 bocal.
DYND3MNF : Manifold pour la connexion de 3 bocal.
DYND4MNF : Manifold pour la connexion de 4 bocal.

Les Manifolds Medline sont des tubes rouges renforcés pour acheminer le vide à chaque bocal fixé sur le pied mobile Medline. Le connecteur blanc du manifold est connecté au tube du vide principal et les connecteurs femelle rouge sont connectés en dessous de chacun des bras de fixation des bocal MED-SOFT, MED-SEMI RIGID (ou sous les anneaux support MED-RIGID). Dispositif réutilisable.

Nettoyage : peut être nettoyé avec une solution comportant un désinfectant selon les protocoles de l'établissement. Le bocal n'est pas autoclavable.

Composition

DYNDSCCLW : plastique renforcé - Sans DEHP
ORBASE : Polyéthylène et PVC - DYNDSCC : métal
DYND2MNF, DYND3MNF, DYND4MNF : PVC et Nylon - Sans DEHP

Conditionnement

DYNDSCCLW : 20 fixations/carton
ORBASE/DYNDSCC : 1 pied mobile/carton
DYND2MNF/DYND3MNF/DYND4MNF : 10 manifolds/carton

Fabricant

Medline Industries, Inc. Northfield, IL 60093 USA - EN ISO 13485

Réglementation

DYND2MNF, DYND3MNF, DYND4MNF : Dispositif médical Class I non stérile – Norme 93/42 / EEC.
DYNDSCCLW, ORBASE, DYNDSCC : Produit de commodité.



Uniquement
DYND2MNF/3MNF/4MNF

© 2017 Medline Industries Inc. or one of its subsidiaries.
All rights reserved.

LIT-HARDWARE - FR01

01.01.INT.12