



FICHE TECHNIQUE

PMFLVMYFP02

PROLONGATEUR LINEAIRE PVC SANS DEHP 3X4,1 REGULATEUR DE DEBIT GRADUE SITE Y LUER LOCK MOBILE FILTRE PURGE

DESCRIPTION

- Régulateur de débit rotatif de précision
- Luer lock mobile
- Site Y
- Sans DEHP

Prolongateur disposant de :

Tube haute qualité : PVC souple anti-plicature

Haute précision : Réglage doux et facile - Débit constant et fiable grâce à un régulateur de débit rotatif gradué.

Fiable et sécurisé : Embout Luer Lock mobile

Résistance à la pression : 4000 hPa (4 Bars ? 58 psi)

Volume mort : 4,38ml.

Graduation de 0 à 250 mL/h.

CARACTERISTIQUES

Prolongateur avec régulateur de débit rotatif avec site d'injection, 15+10+30cm, luer lock mobile, mâle femelle

INDICATIONS D'UTILISATION

Ce dispositif médical est destiné à l'administration parentérale de préparations injectables (médicaments, nutriments).

Ce dispositif permet l'administration précise par gravité de préparations injectables par voie parentérale: médicaments, solutés, nutrition parentérale.

Ne pas utiliser avec les médicaments à risque, les médicaments à marge thérapeutique étroite (catécholamines, morphiniques, héparine, insuline, chlorure de potassium, anticancéreux nécessitant une administration par pompe à perfusion, et toutes les spécialités pharmaceutiques qui intègrent dans le R.C.P. la nécessité d'administration par pompe à perfusion ou pousse seringues.)

Source : OMEDIT CENTRE -- Les bonnes pratiques de perfusion : Module « La précision du débit de perfusion ».

Un contact prolongé avec la Chlorhexidine 2%/Alcool Isopropylique 70° sans temps d'évaporation, et alors que le luer lock est connecté donc sous contrainte physique, présente un risque important de fissuration du luer lock, et doit être évité dans toute la mesure du possible.

En accord avec les recommandations en cours de la SF2H une désinfection des connectiques (lorsqu'elle est nécessaire) avec de l'alcool éthylique à 70° est toujours préférable, car tout aussi efficace sur le plan de la désinfection de matériaux inertes et avec beaucoup moins de risque d'altération des matières plastiques.



FICHE TECHNIQUE
PMFLVMYFP02**INFORMATIONS TECHNIQUES****COMPOSITION**

Capuchon: PE

Luer Lock femelle: PC

Tube: PVC

Regulateur de débit: ABS / TPE

Site d'injection : ABS / Polyisoprène synthétique

Luer Lock male: ABS

Capuchon : PE

Latex ? non

BPA ? oui

Phtalates CMR ? non

Considéré comme médicament ? non

Origine animale ou végétale ? non

Stérile ? oui

Méthode de stérilisation : oxyde d'éthylène

Durée de validité : 3 ans

Sur chaque conditionnement primaire et secondaire, pour les dispositifs médicaux, sont inscrits le numéro de lot, le mode de stérilisation éventuel, la date de péremption et/ou de fabrication et les symboles utilisés en accord avec la norme NF EN 15223-1.

FICHE TECHNIQUE

PMFLVMYFP02

INFORMATIONS REGLEMENTAIRES

EMDN : A03020101 CLADIMED : C54MA99

Classe dispositif médical : IIa

Organisme notifié DM : 0197

directive(s) - règlement(s) européen(s) : DIRECTIVE 93/42/CEE

AQL : Des contrôles sont réalisés par le fabricant lors

NORMES ASSOCIEES :

ISO 80369-7 : Raccords de petite taille pour les liquides et gaz utilisés dans le domaine de la santé - Partie 7:

Raccords à 6% (Luer) destinés aux applications intravasculaires ou hypodermiques

NF EN ISO 8536-9 : Matériel de perfusion à usage médical - Partie 9 : Tubulures pour utilisation avec des appareils de perfusion sous pression

OPERATEURS ECONOMIQUES :

FABRICANT : BQ PLUS MEDICAL

IMPORTATEUR : DIDACTIC

MANDATAIRE : Prolinx GmbH

INFORMATIONS LOGISTIQUES

Nomenclature douane : 3923509000

Conditions de stockage et de transport : A l'abri de la lumière et de l'humidité

	UNITE	SACHET		CARTON	
Référence	EAN	EAN	QTE	EAN	QTE
PMFLVMYFP02	06972620110510		25	16972620110517	150

	UNITE		SACHET		CARTON	
Référence	dimensions	poids	dimensions	poids	dimensions	poids
PMFLVMYFP02	0.00 x 13.00 x 21.00		5.00 x 30.00 x 55.00	.510	37.00 x 42.00 x 39.00	

dimensions (hauteur x largeur x profondeur) en cm, poids en kg